

# Testung mit den Kindern

## Vor dem Test

Vor der ersten Testung führen wir ein kurzes Gespräch mit der Gruppe.

1. Hände waschen
2. Materialien austeilen

## Durchführung

1. Teststreifen auspacken
2. Verpackung des Abstrichtupfers an einer Seite öffnen (noch nicht rausholen)  
  
Achtung: nicht vorne berühren!
3. Röhrchen öffnen und mit der Wäscheklammer aufstellen
4. Testen pro Nasenloch: 4 mal drehen, 15 Sekunden, ca. 2cm tief
5. Abstrichtupfer ins Röhrchen stecken und 10 mal hin und her drehen
6. Röhrchen zusammendrücken und dabei den Tupfer vorsichtig rausnehmen
7. Deckel auf das Röhrchen drücken
8. 4 Tropfen auf den Teststreifen tropfen (nicht oder nur leicht drücken)

## Nach dem Test

1. Maske aufsetzen
2. Teststreifen auf die Testablage legen
3. Lehrkraft sammelt den Müll ein
4. Hände waschen bzw. desinfizieren
5. Ergebnis abwarten (15 min)
6. DOKUMENTIEREN

Bei einem positiven Testergebnis kümmert sich die Klassenlehrerin um das betroffene Kind, bis die Eltern es abgeholt haben. Die restliche Klasse wird von einer anderen Lehrkraft betreut.